


Массажный стол Calmer Bamboo Three Инструкция по эксплуатации



Меры предосторожности


1. При сборке убедитесь, что все винты зафиксированы и фиксирующий трос не порван и не изношен. Убедитесь, что нет трещин на алюминиевой структуре.
2. Не перегружайте стол за пределы рекомендованного веса пользователя. Это может привести к серьезной травме пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства, на основе спирта при чистке винилового покрытия. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплую мыльную воду и вытрите насухо.
4. Убедитесь, что при использовании стола все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и к травме.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол, если они не под наблюдением.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, поскольку они могут повредить покрытие. Держите покрытие стола подальше от контакта с острыми предметами.

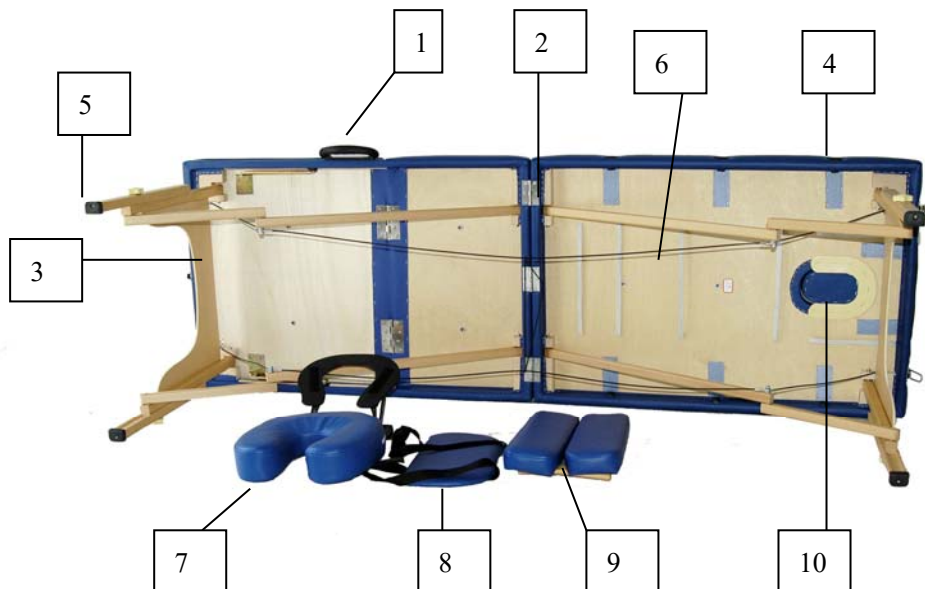

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Ручка | 2. Петля | 3. Торцевая пластина | 4. Выходное отверстие |
| 5. Резиновый наконечник | 6. Трос | 7. Подголовник | 8. Подлокотники |
| 9. Боковые подлокотники | 10. Отверстие для лица | | |

Сборка стола

Этапы сборки:

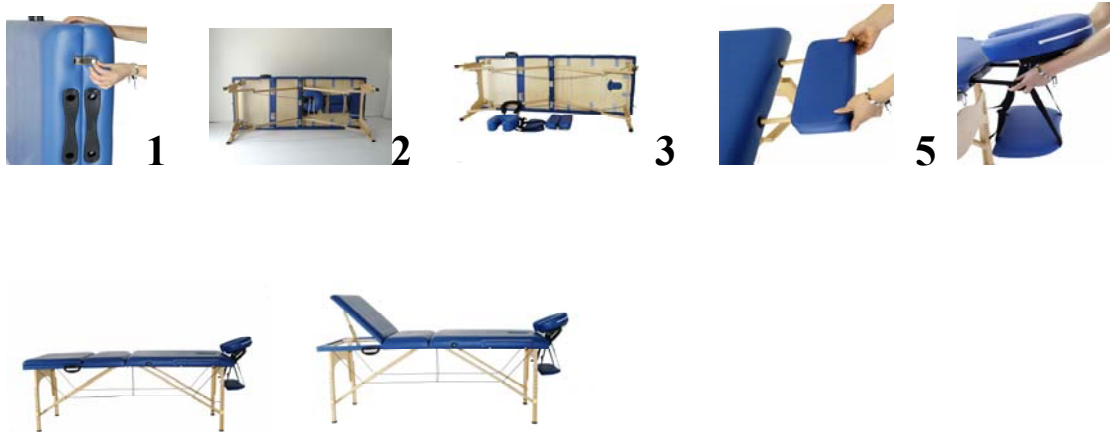

1. Расстегните застёжку.
2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.

Складывание и транспортировка стола



1. Максимально поднимите и опустите спинку, зафиксируйте застёжку.
2. Снимите все аксессуары.
3. Положите стол на бок.
4. Положите все аксессуары под эластичные фиксирующие тросы под верхний шпон.
5. Сложите стол и зафиксируйте застежку.
6. Положите массажный стол в сумку для переноски.

Носите стол как чемодан, взявшись за ручку.

Внимание: Если рама/ножки/конструкция стола повреждены в каком-либо месте, вам не следует использовать стол. Использование стола с повреждениями может причинить вред или серьезные травмы для вас или вашего пациента. Следует немедленно устранить все неполадки.